

Firmamız tarafından hazırlanan reçetemiz deA1 grubunda yer alan antijenler Türkiye’de en sık rastlanan alerji çeşitleri olup karışım halinde bulunmaktadır.A1 grubu reçetede görülen C1,D1,A2,B2,C2,D2 gruplarını içermekte; 8 başlıklı aplikatör ile hastaya test yapıldığında 2 ev tozu akarı ile toplam 50 antijeni aynı anda hastaya yüklemektedir.Ayrıca A1 grubunda yer almayan B1 hububat grubu ve E1gıda grubu da bulunmaktadır.

Aplikatörler ise 8 başlıklı olup her başlığında 9 adet lazerle inceltilmiş statik elektrik yüklü küçük igneler bulunmaktadır.

Hastaya test yapılacağı zaman 3 grup ve 24 kuyucuktan oluşan Multi Test tepsi bulunmaktadır.Hangi gruplara bakılırsa Multi Test tepsinde her bir şişeden bir damlalık miktarda antijen dökülür.Antijenler yerleştirildikten sonra steril kutusundan çıkarılan aplikatör tepsiye bırakılır.Aplikatör statik elektrik yüklü olduğundan minimum miktarda antijeni yükleyip hazır hale gelir.Test yapılacak hastanın kolu açılıp alkolle temizlenip havayla kurutulduktan sonra dirsekten 5-6 cm aşağıya kolun iç yüzeyine aplikatör 3-5sn bastırılıp test tamamlanmış olur.Aplikatör tekrar kullanılmaz ve steril çöp kutusuna atılır.Hastanın kolunun sağ üst köşesi 1 numara olarak işaretlendikten sonra saat yönünde numaralandırma yapılır.15-20 dakika sonra sonuç alınır.Firma tarafından hazırlanan cetvellerle ölçüm yapılarak +1’den +4’e kadar reaksiyonlar reçeteye yazılır.Eğer hasta karışım grubundan (A1grubu) herhangi birine reaksiyon verirse;istenildiği takdirde alt gruplarda test yapılabilir.Örneğin çimen grubuna karşı alerjisi olan hastanın C1 grubuna test yapılarak hangi tür çimene karşı alerjisi olduğuda belirlenebilir.

Ayrıca A1 grubunda yer alan Histamin’in (pozitif kontrolün) mutlaka +3 vermesi gerekmektedir.Bu hastanın alerji testine hazır olduğunu ve herhangi bir antihistaminik ilaç kullanmadığını belirtir. Eğer hasta antihistaminik ilaç kullanıyorsa 10 gün öncesinden ilacı kesilmelidir.

Tepside kalan antijenler birçok hasta için test yapılma imkanı tanır ve tepsi kapatılıp buzdolabına yerleştirilir.Yeni bir hasta geldiğinde antijenlere dokunulmaz yeni bir aplikatör kullanmak yeterli olur.5cc antijenle 500-520 hastaya test yapılabilir.Ne zaman aplikatör antijeni tepside alınamaz o zaman tekrar antijen şişelerinden dolun yapılır.

Antijenler tamamen doğal özlü olup gliserin içermektedir.Bu antijenin ömrünü uzatmak amaçlıdır.

Alerjik extratlar Amerika’da mukim ALLERMED laboratuvarları tarafından üretilmektedir.FDA onayına haizdir.Multi test aplikatörü Amerika’da mukim LINCOLN laboratuvarları tarafından üretilmektedir.FDA-CE onayına haizdir.